

FRÍO—Insulin Reisetasche

Hält Ihr Insulin kühl—selbst bei hohen Aussentemperaturen



FRÍO[®]
INSULIN REISETASCHE

Neue Freiheit auf Reisen!

FRÍO – Die Tasche, welche Ihr Insulin kühl hält

FRÍO ist eine effektive und günstige Lösung des Problems, Insulin kühl zu halten, ohne dafür Strom oder Kühlelemente zu benötigen.

Das Prinzip ist ganz einfach. Die Innentasche wird lediglich in kaltes Wasser getaucht, woraufhin die enthaltenen Kristalle ein Gel bilden. Stecken Sie das gekühlte Insulin hinein. Durch ein Verdunstungssystem bleibt es nun tagelang gekühlt. Die beigefügte Aussentasche schützt die umliegenden Gegenstände in Ihrer Handtasche oder Ihrem Koffer.

Die FRÍO-Tasche erleichtert das Leben Insulinabhängiger Diabetiker und kann immer wieder benutzt werden. Auch für andere Zwecke kann die FRÍO-Tasche eingesetzt werden. So hält sie beispielsweise Medikamente kühl, welche Raumtemperatur nicht überschreiten dürfen.



Die Vorteile von FRÍO

- Ohne Strom, Batterien oder Kühlelemente
- Erfordert nur Wasser zur Aktivierung
- Wiederverwendbar
- Sorgenfrei reisen
- Leicht und preiswert
- Verschiedene Grössen und Farben
- Langanhaltende Kühlung



Bestellinformationen

	Artikel-Nr.	Grösse	Verkaufseinheit
Einzeltasche: Für 1 Pen oder 2 Flaschen	FRIO A BLAU	6.5 x 18 cm	1 Stück
Einzeltasche: Für 1 Pen oder 2 Flaschen	FRIO A ROT	6.5 x 18 cm	1 Stück
Doppel-Tasche: Für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C BLAU	8 x 18 cm	1 Stück
Doppel-Tasche: Für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C ROT	8 x 18 cm	1 Stück
Mittlere Tasche: Für 2 Ampullen oder 6 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO D BLAU	14 X 12 cm	1 Stück
Mittlere Tasche: Für 2 Ampullen oder 6 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO D ROT	14 X 12 cm	1 Stück
Kleine Tasche: Für 3 Ampullen oder 10 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO B BLAU	14 x 15 cm	1 Stück
Kleine Tasche: Für 3 Ampullen oder 10 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO B ROT	14 x 15 cm	1 Stück
Grosse Tasche: Für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen/Ampullen	FRIO E BLAU	14 x 19 cm	1 Stück
Grosse Tasche: Für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen/Ampullen	FRIO E ROT	14 x 19 cm	1 Stück
Expedition Modell: Für 9 Pens oder viele Ersatzpatronen	FRIO F BLAU	21 x 15 cm	1 Stück
Expedition Modell: Für 9 pens oder viele Ersatzpatronen	FRIO F ROT	21 x 15 cm	1 Stück
Pumpen Tasche: Für Insulinpumpe	FRIO H BLAU	9 x 11 cm	1 Stück
Pumpen Tasche: Für Insulinpumpe	FRIO H ROT	9 x 11 cm	1 Stück

Sie können jedes unserer Produkte auf allen Kanälen (per Telefon, Mail, Webshop, Fax) einfach und unkompliziert bestellen und erhalten diese Artikel innerhalb von 2 Arbeitstagen.

bestellung@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

☎ +41 52 720 25 26 | 📠 +41 52 720 25 27

Erfahrungen der FRÍO Nutzer...

“Letzten Sommer ging’s ins heiße Land China. Im allgemeinen war dort alles ziemlich primitiv, aber ich fand immer ein Waschbecken oder einen Eimer, in denen ich meine Frio Tasche eintauchen konnte, um mein Insulin sicher für Tage gekühlt zu haben.” J.R., in H

“Ich habe auf einen dreiwöchigen Griechenland-Urlaub eine FRIO Tasche mitgenommen und konnte dabei bei brütenden Temperaturen am Pool und am Strand mein Insulin tadellos kühl halten.” P.P.H. in W

“Das physikalische Wirkungsprinzip ist Verdunstungskälte. Es funktioniert um so besser, je höher die Außentemperaturen sind und kann nicht zum Gefrieren des Insulins führen!” KS in H

Weitere Diabetesprodukte

Neben den Blutzuckermessgeräte bieten wir Ihnen eine komplette Diabeteslinie an. Bei Mediq Suisse AG erhalten Sie unter anderem folgende Produkte:

Blutzuckermessgeräte
(WaveSense PRESTO)



Sterile Einmallanzetten
(28 und 30G)



Sicherheitslanzetten
(1.5, 1.8, 2.0 und 2.4 mm)



Pen-Nadeln
(6, 8, 10 und 12 mm)



Hypo-Fit® Flüssigzucker
(Orange, Tropical, Zitrone)



Hydraline Pflegeserie
(Handcreme, Fusscreme, Bodylotion und Waschlotion)



Vertrieb:

MEDIQ SUISSE AG | Gewerbestrasse 12 | CH-8132 Egg
info@mediqsuisse.ch | bestellung@mediqsuisse.ch | ww.mediqsuisse.ch
☎ +41 52 720 25 26 | 📠 +41 52 720 25 27

