

# EyeGiene®

Lingettes stériles pour le nettoyage quotidien, l'hydratation et l'apaisement des paupières internes et externes et de la zone

PAUPIÈRES  
INTERNES  
ET EXTERNES



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Le nettoyage quotidien des yeux à l'aide d'outils médicaux appropriés vous permet d'éliminer efficacement les résidus de saleté normaux, de réduire le développement d'infections bactériennes et de laisser une agréable sensation de bien-être.

**EyeGiene®** la lingette stérile, douce et délicate pour le nettoyage quotidien des paupières internes et externes et de la zone périoculaire.

## MODE D'EMPLOI:

L'utilisation d'EyeGiene® est particulièrement indiquée en cas de:

- L'hygiène quotidienne des yeux et de la zone périoculaire.
- En cas de maladies oculaires liées à des troubles de la thyroïde, Sty, Chalazion, blépharite.
- Traitement des conjonctivites allergiques ou des infections de différents types, y compris chez les nourrissons.
- Fatigue, présence de corps étrangers dans les yeux et sécheresse due à un manque de larmes.
- Avant/après des interventions chirurgicales ophtalmologiques.
- Hygiène quotidienne des patients souffrant de séquelles ophtalmologiques liées au diabète et aux carences en vitamines A, B, PP
- Recommandé pour les porteurs de lentilles de contact (après leur retrait).

RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS


## MODE D'EMPLOI:



Ouvrez le sachet par le côté facile à ouvrir.



Retirez la lingette et nettoyez délicatement l'intérieur des paupières et la zone autour des yeux.

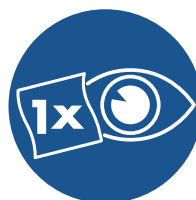

Utilisez une nouvelle lingette pour chaque œil.



Changez de lingette après avoir nettoyé une zone infectée afin d'éviter de contaminer les zones saines.

Ingrédients	Propriétés
Acide hyaluronique	Propriétés hydratantes, hydratantes et relaxantes
Phospholipides	Nettoyage en profondeur mais non agressif de l'œil
Chamomilla	Propriétés apaisantes, décongestionnantes et rafraîchissantes
Hélichryse	Décongestionnant et antioxydant (effet photoprotecteur contre les rayons UV)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Stérile
- Solution isotonique, non allergène, testée dermatologiquement
- Taille de la lingette : 14 cm x 15 cm
- Emballage individuel pratique et stérile.

### EFFETS:

- Soulage les larmoiements, les rougeurs, les démangeaisons, la sécheresse et l'inconfort causés par la saleté ou les corps étrangers.
- Favorise une sensation de soulagement immédiate et durable.
- N'irrite pas et ne laisse pas de résidus moussants, n'interfère pas avec d'autres produits ophtalmiques.
- Ne contient pas d'alcool, de silicones, de parabènes ou d'ingrédients pouvant provoquer des réactions allergiques.
- Ne nécessite pas de lavage.

### CLASSIFICATION:

Dispositif médical de classe IIa

### CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:

Welcare est certifié:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Processus de production:

Fabriqué en salle blanche



NO D'ARTICLE:	DESCRIPTION:	UNITÉS DE VENTE:
95255S	EYEGIENE® 1 sachet : 1 lingette stérile à usage unique 1 boîte : 16 sachets	1 carton : 48 boîtes

Distributeur en Suisse



Mediq Suisse AG | gd medical | Schwerzistr. 6 | 8807 Freienbach  
T +41 (0)55 420 33 55 | F +41 (0)55 420 33 56  
www.gdmedical.ch | info@gdmedical.ch

Welcare Industries S.p.A.

Lieu de production: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)  
Bureaux de Milan: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano  
Bureaux de Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma  
Siège social de l'entreprise: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano  
[www.welcareindustries.com](http://www.welcareindustries.com)

Révision 00 2022/03

**WELCARE**  
Protecting People - Caring for Nature