

EyeGiene®

Salviette oculari sterili per la detersione e l'idratazione degli occhi e dell'area perioculare

PALPEBRA INTERNA ED ESTERNA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Detergere quotidianamente gli occhi con l'uso di dispositivi medici idonei consente di rimuovere efficacemente i normali residui di sporco limitando la possibilità di infezioni batteriche e restituendo al tempo stesso una piacevole sensazione di benessere.

EyeGiene® è la salvietta sterile, morbida e delicata per la detersione quotidiana delle palpebre interne ed esterne e della zona perioculare.

INDICAZIONI D'USO:

L'uso di EyeGiene® è indicato soprattutto in caso di:

- Igiene quotidiana dell'occhio e dell'area perioculare.
- In caso di problematiche oculari associate a disturbi della tiroide, orzaiolo, calazio, blefariti.
- Trattamento di congiuntiviti allergiche o infezioni di diversa natura anche nei bambini.
- Ipersensibilizzazione causata da agenti atmosferici come polvere, smog, pollini, esposizione prolungata agli schermi del pc.
- In caso di affaticamento oculare, corpi estranei nell'occhio, secchezza causata dalla mancanza di lacrime.
- Prima/dopo gli interventi di chirurgia oftalmica.
- Igiene quotidiana di pazienti che soffrono di implicazioni oftalmologiche associate a diabete o mancanza di vitamine A, B, PP.
- Consigliato per chi usa lenti a contatto (previa rimozione delle stesse).

INDICATO per ADULTI e BAMBINI




ISTRUZIONI PER L'USO:



Aprire la busta utilizzando l'apposita apertura facilitata



Rimuovere la salvietta e detergere delicatamente l'interno e l'esterno dell'occhio e l'area perioculare.

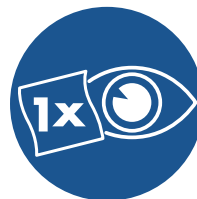

Utilizzare un panno separato per ciascun occhio.



Cambiare il panno dopo la detersione di un'area infetta per non contaminare altre aree sane.

WELCARE
Esperti della pelle - Alleati della Natura

Ingredienti	Proprietà
Acido Ialuronico	Umidificante, idratante, e decongestionante
Fosfolipidi	Detersione profonda e non aggressiva dell'occhio
Camomilla	Lenitivo, decongestionante, rinfrescante
Elicriso	Decongestionante e antiossidante (azione protettiva contro raggi UV)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sterile
- Soluzione isotonica, non allergenica, testata dermatologicamente
- Dimensione garza 14 cm x 15 cm
- Pratica confezione monodose sterile.

I BENEFICI:

- Aiuta a ridurre la lacrimazione, rossore, prurito, secchezza e fastidio causato da residui di sporco o corpi estranei.
- Favorisce una immediata e duratura sensazione di sollievo
- Non irrita e non lascia residui schiumosi, non interferisce con altri prodotti oftalmici.
- Non contiene alcool, siliconi, parabeni o ingredienti che possano dare reazioni allergiche.
- Non richiede risciacquo.

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND:

Dispositivo Medico. Classe IIa Codice CND: **M040399**
 Numero di Repertorio: **1964669**

CERTIFICAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE:

Welcare è certificata:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Processo produttivo:

Manufatto in camera bianca



Distributeur en Suisse



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
 Tél 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

CODICE:	DESCRIZIONE:	CONFEZIONE DI VENDITA:
95255S	EYEGIENE® 1 busta: 1 garza monouso sterile 1 dispenser: 16 buste	1 scatola: 48 dispensers

Welcare Industries S.p.A.

Sede produttiva: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
 Sede commerciale: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
 Sede commerciale: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
 Sede legale: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano
www.welcareindustries.com

Revisione 00 2022/03

WELCARE
 Esperti della pelle - Alleati della Natura