

SINAQUA®

SHAMPOO CAP

**Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung
von Pilzkrankungen der Kopfhaut.**



PRODUKTMERKMALE:

Sinaqua® Shampoo Cap ist eine vorgetränkte, wasserfeste Einweg-Waschhaube, aussen und innen mit einem weichen Stoff ausgekleidet.

Sinaqua® Shampoo Cap reduziert das Risiko einer Pilzkrankung der Kopfhaut und trägt zur Beseitigung bereits vorhandener Pathologien bei. Sie ist ideal für bettlägerige oder nicht selbstständig lebende Menschen. Die Shampoo Cap benötigt kein Wasser; in wenigen Minuten ist das Haar weich und leicht kämmbar.

Sinaqua® Shampoo Cap enthält keine Parabene, Harnstoff, PEG, Glycerin, Alkohol oder Latex.

ANWENDUNG:

Sinaqua® Shampoo Cap ermöglicht es, das Patienten-Haar im Bett oder auf dem Stuhl zu waschen, wenn das traditionelle Waschen schwierig ist.

- **Sinaqua® Shampoo Cap**, kann im Beutel auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden: in der Mikrowelle für max. 15 Sekunden oder in heissem Wasser.
- Achten Sie darauf, **Sinaqua® Shampoo Cap** nicht zu stark zu erhitzen.
- Setzen Sie die Kappe auf den Kopf.
- Massieren Sie das Haar für ein paar Minuten.
- Entfernen Sie die Kappe, nicht ausspülen.
- Trocknen Sie das Haar mit der üblichen Methode.

INHALTSSTOFFE:

Aqua

Extrakt aus Aloe barbadensis-Blättern

Allantoin

Laurylglucosid

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate

Polysorbat 20

Dinatrium-EDTA

Phenoxyethanol

Natriumbenzoat

Propylenglykol

Benzalkoniumchlorid

Parfüm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aussen wasserfest.
- Elastischer Gummizug an der Waschhaube.
- Innenfutter aus Stoff, mit hohem Widerstand gegen Reibung.
- Hoher Waschlösungs-Gehalt pro Haube.
- Kein Ausspülen erforderlich.

KLASSIFIZIERUNG:

Medizinprodukt der Klasse I

ZERTIFIZIERUNGEN UND UMWELTKONTROLLEN:

Welcare ist zertifiziert:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Produktionsprozess:

Im Reinraum hergestellt



ARTIKEL-NUMMER:

BESCHREIBUNG:

VERKAUFSEINHEITEN:

95200

SINAQUA® Shampoo Cap

Sinaqua® Shampoo Cap 1 Beutel: 1 Haube

1 Karton: 30 Beutel

Vertrieb Schweiz



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tel 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

Revision 00 2022/05

Welcare Industries S.p.A.

Produktionsstandort: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Geschäftsstelle Mailand: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Geschäftsstelle Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Eingetragener Firmensitz: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Protecting People - Caring for Nature