

SINAQUA®

SHAMPOO CAP

Dispositivo Medico per la prevenzione ed il trattamento meccanico di micosi del cuoio capelluto



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Sinaqua® Shampoo Cap è una cuffia monouso, impermeabile esternamente e rivestita internamente con un soffice tessuto pre-imbibito.

Sinaqua® Shampoo Cap riduce i rischi di micosi del cuoio capelluto e contribuisce alla risoluzione di eventuali patologie già in atto. E' ideale per persone allettate o non autosufficienti. Il dispositivo non richiede utilizzo di acqua; in pochi minuti i capelli risultano morbidi e facilmente gestibili.

Sinaqua® Shampoo Cap non contiene parabeni, urea, PEG, glicerina, alcool, latex.

INDICAZIONI PER L'USO:

Sinaqua® Shampoo Cap permette di lavare i capelli del paziente a letto o sulla sedia quando il lavaggio tradizionale è difficile.

- **Sinaqua® Shampoo Cap**, chiusa nella sua busta, può essere riscaldata alla temperatura desiderata in forno a microonde per non più di 15 secondi o immergendo la busta in acqua calda.
- Assicurarsi di non riscaldare **Sinaqua® Shampoo Cap** eccessivamente..
- Posizionare la cuffia sul capo.
- Massaggiare i capelli per pochi minuti.
- Togliere la cuffia e non risciacquare.
- Asciugare i capelli con il metodo normalmente utilizzato.

INGREDIENTI:

Aqua

Aloe barbadensis estratto di foglia

Allantoina

Lauryl Glucoside

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate

Polysorbate 20

Disodium EDTA

Phenoxyethanol

Sodium Benzoate

Propylene Glycol

Benzalkonium Chloride

Profumo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Impermeabile esternamente.
- Elastico perimetrale contenitivo.
- Rivestimento interno in tessuto, con alta capacità di resistenza allo sfregamento.
- Alto contenuto di soluzione per cuffia.
- Nessun risciacquo richiesto.

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND:

Dispositivo Medico. Classe I.

Codice CND: **M0499**

Numero di Repertorio: **1739789**

CERTIFICAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE:

Welcare è certificata:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Processo produttivo:

Manufatto in camera bianca



Distributeur en Suisse



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tél 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

CODICE:

DESCRIZIONE:

CONFEZIONE DI VENDITA:

95200

SINAQUA® Shampoo Cap

Sinaqua® Shampoo Cap 1 busta: 1 cuffia

1 scatola: 30 buste

Revisione 00 2022/03

Welcare Industries S.p.A.

Sede produttiva: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)

Sede commerciale: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano

Sede commerciale: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma

Sede legale: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Esperti della pelle - Alleati della Natura