

Activon® Tube

100 % reiner, medizinischer
Manuka-Honig




Activon® Tube enthält 100 % reinen Manuka-Honig ohne Zusätze. Unser Manuka-Honig wurde speziell für die Wundbehandlung gefiltert und sterilisiert. Er reinigt und beseitigt Wundgerüche und bewahrt ein feuchtes Wundmilieu.

Activon® Tube eignet sich optimal für das Debridement von nekrotischem Gewebe. Die Tube kann zusätzlich mit einer Wundaufgabe kombiniert werden, falls der Honiganteil durch starke Exsudation vermindert wird. Activon® Tube kann außerdem sehr gut bei Wundhöhlen angewandt werden. Eventuell vorhandene Honigreste werden einfach mit einer Kochsalzlösung ausgespült.

Anwendung

Drehen Sie die Kappe ab und applizieren Sie Activon® Tube in die Wunde oder verwenden Sie sie in Verbindung mit Activon® Tulle, Actilite®, Algivon®, Algivon® Plus oder Algivon® Plus Ribbon um die Konzentration des Honigs wundseitig zu erhöhen. Abhängig von der Wundart und der Exsudatmenge sollte der Sekundärverband ein Filmverband oder ein absorbierender Verband sein. Wir empfehlen unsere Eclipse® Superabsorber. Activon® Tube ist jeweils nur für einen Patienten einzusetzen und ist bis 90 Tage nach Öffnen haltbar.

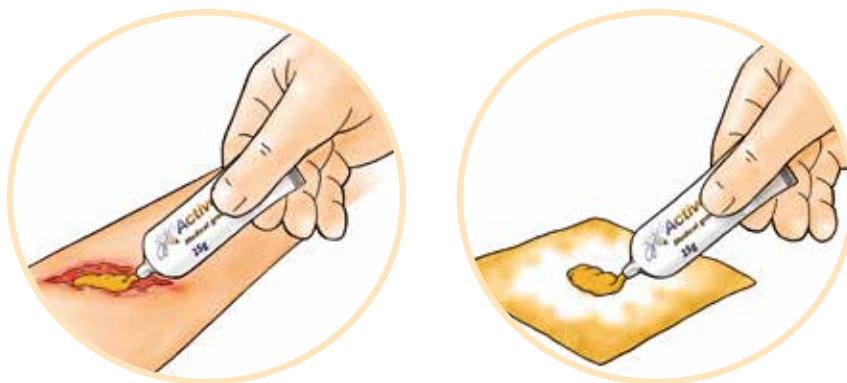

Indikation

Activon® Tube kann bei allen Wundarten angewendet werden, ist aber speziell bei belegten, nekrotischen und übel riechenden Wunden hervorragend geeignet. Beispiele sind:

- Dekubitus
- Verbrennungen
- Chirurg. Wunden
- Infizierte Wunden
- Diabet. Wunden
- Hautentnahmestellen
- Venös- und/oder arteriell bedingte Wunden
- Tiefe Wunden, z. B. Fisteln

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	PZN
25 g	CR3830	12	08840231

Vertrieb Schweiz



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tel 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

Die natürliche Wahl zur Wundheilung

100 % Medizinischer Manuka-Honig



Warum Manuka-Honig?

Activon® Manuka-Honig verfügt über wertvolle Eigenschaften, die einen ausgesprochen positiven Einfluss auf die Wundheilung nehmen. Activon® Manuka-Honig hat sich daher bei der Behandlung chronischer Wunden fest etabliert.

Die osmotische Wirkung des Activon® Manuka-Honigs unterstützt ein optimales Exsudat-Management: Der Wunde wird einerseits Exsudat entzogen, andererseits trägt ein angemessenes Feuchtigkeitsmilieu zu einem besseren und schnelleren Abheilen der Wunde bei. Activon® Manuka-Honig fördert die Ablösung von nekrotischem Gewebe und somit die Wundheilung. Der Wundgeruch wird durch Activon® Manuka-Honig vermindert und verbessert dadurch deutlich die Lebensqualität der Patienten.

Antibakterieller Honig

Activon® Manuka-Honig wird vom Nektar der Manuka-Pflanze aus Neuseeland gewonnen, welche zu den Leptospermum-Arten gehört und im Volksmund auch Tee-Baum genannt wird. Der Honig dieser Pflanze hat einzigartige, antibakterielle Eigenschaften, die keine andere Honig-Sorte aufweist.

Die antibakterielle Eigenschaft des Activon® Manuka-Honigs bleibt auch in geringen Konzentrationen aktiv. Dieses Potenzial ist bekannt als *Non-Peroxide-Activity* (NPA) oder *Unique Manuka Factor* und wird mit der antibakteriellen Wirksamkeit von verdünntem Phenol verglichen.

Activon® Manuka-Honig weist ein breites Spektrum an antimikrobieller Wirkung auf und kann gegen eine Reihe von Bakterien, wie z. B. Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, MRSA und VRE eingesetzt werden.

Activon® Manuka-Honig Produkte sind für Diabetiker sehr gut geeignet, da der Honig nicht über das Blut aufgenommen wird. Bei großflächigen Wunden empfehlen wir dennoch die regelmäßige Kontrolle des Blutzuckerspiegels

Eigenschaften von Activon® Manuka-Honig

- Schnelle Wundheilung durch effektives Debridement
- Vermindert Wundgeruch und verbessert damit die Lebensqualität des Patienten
- Bewahrt ein feuchtes Wundmilieu und unterstützt eine schnellere Heilung bei chronischen Wunden
- Das breite Spektrum von Activon® Manuka-Honig Produkten bietet für jede Wunde das passende Produkt
- In-vitro-Studien haben gezeigt, dass niedrige Konzentrationen von Activon® Manuka-Honig eine Biofilmbildung mit MSSA, MRSA und VRE verhindern
- Honig ist natürlich und hat keine zytotoxischen Eigenschaften

Advancis Medical setzt die wertvollen Eigenschaften des Manuka-Honigs in vielseitig einsetzbare Medizinprodukte um und ermöglicht so für jede Phase der Wundheilung die passende Produktwahl.