

Jalosome[®] Soothing Gel

Wirksam bei Hautverletzungen durch Chemo- oder Strahlentherapie



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Vesikuläre Suspension in hydrophitischem Gel von mittlerer Viskosität für die Behandlung von Hautläsionen nach Strahlentherapie und zur Linderung der damit einhergehenden Schmerzen.

JALOSOME[®] Soothing gel bestehend aus Liposomen in vesikulären Mikrostrukturen, die das Eindringen der verschiedenen Komponenten in die Hornschicht erleichtern, entfalten die kombinierte Wirkung, begünstigen den Haut-Regenerationsprozess und lindern Schmerzen.

INDIKATION:

- Aktiv bei der Behandlung von Hautverletzungen.
- Indiziert bei Radiodermatitis, Dermatitis, erythematösen sowie schmerzhaften Hautläsionen sowie allgemeinen Hautentzündungen.
- Empfohlen für alle Körperregionen.

WIRKUNGSMECHANISMEN:

JALOSOME[®] Soothing gel besteht aus sieben Komponenten mit verschiedenen Formulierungen und spezifischen Funktionen. Insbesondere enthält es in einem vesikuläre Mikrobegebilde, bestehend aus Phosphatidylcholin-Doppelschichten, Hyaluronsäure-Gel mit hohem und niedrigem Molekulargewicht.

Funktion besteht darin, die anderen Bestandteile durch die oberflächlichen Hautschichten und insbesondere durch die Hornschicht, welche die Hautbarriere darstellt, zu transportieren.

Inhaltsstoffe:

Hyaluronsäure

Alantoin

N-Acetylcarnitine

Eigenschaften

Schützt die Haut vor aggressiven äusseren Einflüssen

Fördert den physiologischen Zellerneuerungsprozess

Schafft die Voraussetzungen für den physiologischen Prozess der Zellerneuerung und ist hilfreich bei der Schmerzlinderung

ZUSAMMENSETZUNG:

Wasser, L-Acetyl-L-Carnitinehydrochlorid, Allantoin, Glycerin, hydriertes Phosphatidylcholin, Natriumhyaluronat [1700 Kda], Natriumhyaluronat [200-400 Kda], Phenoxyethanol

KLASSIFIKATION:

Ila Medizinprodukt

DOSIERUNG UND ANWENDUNG:

Jede Gel-Portion aus der Airless-Flasche entsprechen 0,2 g Gel und reicht für die Behandlung von 16 cm² Haut. Tragen Sie die benötigte Menge je nach Ausmass der Läsion auf und massieren Sie diese sanft ein um das Produkt gleichmässig zu verteilen; nach wenigen Minuten sind keine Rückstände mehr vorhanden.

Zweimal täglich auftragen, bis die Hautläsion abgeklungen ist, sofern nicht anders verordnet.

KONTRAINDIKATIONEN:

Es gibt keine bekannten produktspezifischen Kontraindikationen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bei bekannter Allergie gegen einen der Bestandteile sollte das Produkt nicht angewendet werden. Im Falle einer Sensibilisierung ist die Behandlung abzubrechen und den Arzt zu informieren. Nach Gebrauch nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht schlucken.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN UND ANDERE INTERAKTIONEN:

Keine Wechselwirkungen bekannt.

NEBENWIRKUNGEN:

Keine Nebenwirkungen bekannt. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit oder individueller Allergie gegenüber einer der Bestandteile; bei Auftreten einer Überempfindlichkeit Anwendung abbrechen und Arzt informieren.

UNVERTRÄGLICHKEITEN:

Keine Unverträglichkeiten bekannt. Für eine bessere Wirksamkeit empfehlen wir vor, während und nach der Anwendung von **JALOSOME® Soothing gel** auf andere feuchtigkeitsspendende Produkte ZU VERZICHTEN.

HALTBARKEIT:

Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung 35 Monate nach dem Herstellungsdatum haltbar.
Nach dem Öffnen muss die einzelne Flasche innerhalb von 7 Tagen verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR LAGERUNG:

Kühl und trocken lagern, fern von Wärmequellen, Licht und Feuchtigkeit.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beim ersten Öffnen beschädigt oder nicht perfekt intakt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum.

ARTIKEL-NUMMER:	BESCHREIBUNG:	VERKAUFSEINHEITEN:
95810	JALOSOME® Soothing gel 20 airless bottles 10 ml	1 carton: 8 boxes
95810F	4 airless bottles 10 ml	1 carton: 28 boxes



Vertrieb Schweiz



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tel 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

Revision 00 2022/11

Welcare Industries S.p.A.

Produktionsstandort: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Geschäftsstelle Mailand: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Geschäftsstelle Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Eingetragener Firmensitz: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Protecting People - Caring for Nature