



TROY°

Die sichere Wärmflasche die mehr als doppelt so lange warm hält

TROY° überzeugt durch innere Werte - das integrierte TROY°-Pad sorgt dafür, dass sehr heisses Wasser schnell auf Wohlfühltemperatur gebracht wird und mehr als 2x so lange warm hält. Der patentierte Sicherheitsverschluss TROY°-LOCK'N'KEY wurde speziell für Wärmflaschen entwickelt, da er das Wasser tropf- und verbrühsicher einschliesst.

TROY° - die Innovation aus Deutschland

- ist schneller auf Wohlfühltemperatur
- wird nicht zu heiss
- bleibt mehr als 2x so lange warm
- intelligenter TROY°-BEZUG, wärmeisolierend sowie wärmeleitend (farbige Bezüge, waschbar bei 40°C)
- aus sanforisierter Baumwolle, kochbar (weisser Bezug)



TROY°-LOCK'N'KEY

- schliesst Wasser tropf- und auslaufsicher ein
- verhindert unabsichtliches Öffnen des Verschlusses (z.B. durch Kinder oder Menschen mit Demenz)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Verkaufseinheit
TRO-00001	Premiumpaket Wärmflasche (inkl. Sicherheitsverschluss)	Bezug grau/pink	1 Stück
TRO-00002	Premiumpaket Wärmflasche (inkl. Sicherheitsverschluss)	Bezug blau/gelb	1 Stück
TRO-00003	Premiumpaket Wärmflasche (inkl. Sicherheitsverschluss)	Bezug weiss, kochbar	1 Stück
TRO-00004	Sicherheitsverschluss Stern	Blau	1 Stück

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere VerkaufsberaterInnen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12 | CH-8132 Egg b. Zürich
info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27




TROY°

Ist schneller auf Wohlfühltemperatur

Das integrierte TROY°-Pad ist mit einem natürlichen Salz befüllt, welches anfangs hart ist. Sobald heisses Wasser in die Wärmflasche gefüllt wird, wird das Pad weich, da es überschüssige Wärmeenergie aufnimmt. Fällt die Wassertemperatur hält das Pad das Wasser länger warm und verfestigt sich langsam.

WÄRMEABGABE / HEAT EMISSION

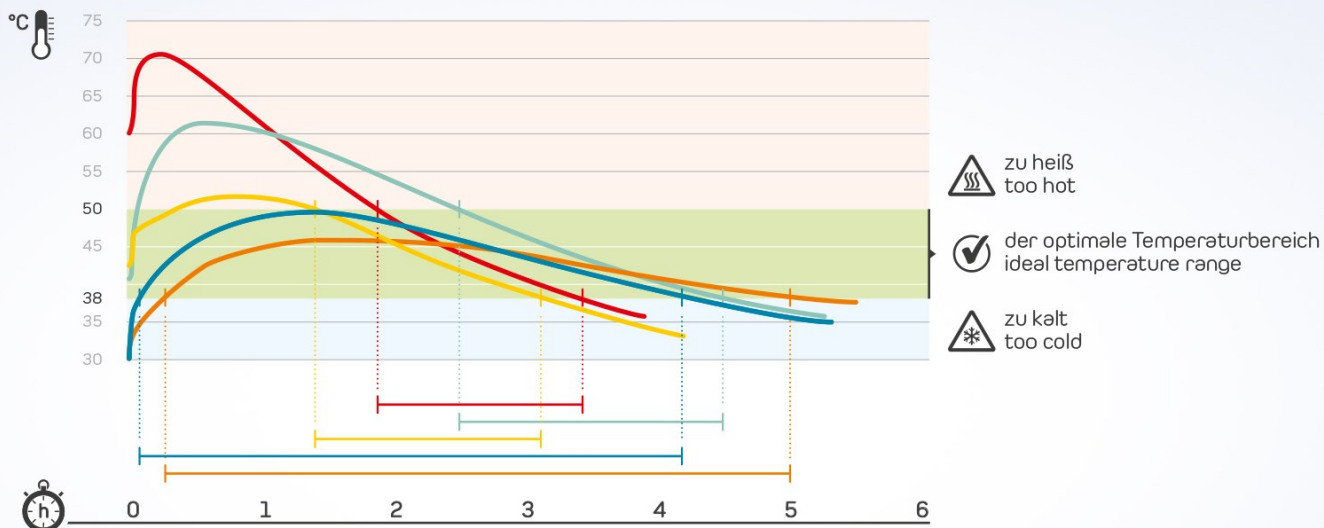

-  konventionelle Wärmflasche
standard hot-water bottle
-  konventionelle Wärmflasche mit konventionellem Fleece-Bezug
standard hot-water bottle with standard fleece cover
-  TROY°-Wärmflasche
TROY° hot-water bottle
-  TROY°-Wärmflasche mit konventionellem Bezug
TROY° hot-water bottle with standard fleece cover
-  TROY°-Wärmflasche mit TROY°-Bezug:
am längsten im optimalen Temperaturbereich
TROY° hot-water bottle with TROY°-cover:
longest in the ideal temperature range

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12 | CH-8132 Egg b. Zürich
info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27